



Agrafage Da Vinci®

SureForm™ 60

Avec la technologie
SmartFire™

Pour de meilleurs
résultats avec
votre agrafeuse.



Pour de meilleurs résultats avec votre agrafeuse.

SureForm™ 60 est une agrafeuse nouvelle génération.

Son fonctionnement repose essentiellement sur la technologie SmartFire™ qui contrôle la compression des tissus avant et pendant l'utilisation grâce à son réglage automatique pour une ligne d'agrafes réussie.

Un cône articulé de 120° vous permet d'approcher le tissu de manière naturelle, réduisant potentiellement le besoin de le tirer vers l'agrafeuse.¹

Avec SureForm60, fini les incertitudes et place aux performances inégalées.¹

1. Les résultats des tests sont archivés



Compatible avec les systèmes chirurgicaux da Vinci X® et da Vinci Xi®

Plus de maniabilité.

Un cône articulé de 120° vous permet de manœuvrer votre agrafeuse et de la positionner où vous le souhaitez.

60° Bas

60° Droite

60° Gauche

60° Haut



45° Gauche

45° Droite



Powered
Echelon Flex

45° Gauche

45° Droite



EndoGIA Ultra

SureForm™ 60 offre une plus grande amplitude de mouvement que la main ou les agrafes laparoscopiques traditionnelles.*

* Comparé aux dispositifs EndoGIA Ultra avec technologie Tri-Staple et Powered Echelon Plus avec système GST en mai 2018

Une intelligence accrue.

En appuyant sur une pédale, vous activez la technologie SmartFire qui mesure la compression des tissus avant et pendant l'agrafage.

Cette technologie utilise plus de 1 000 mesures par seconde* pour ajuster automatiquement le processus de déclenchement au fur et à mesure que la ligne d'agrafes se forme et que la transection progresse.

Simple d'utilisation, cette technologie avancée assure une ligne d'agrafes plus régulière, tout en prévenant des dommages et cela à travers une gamme d'épaisseur différente de tissus.**




* Les résultats des tests sont archivés

** Comparé aux dispositifs EndoGIA Ultra avec technologie Tri-Staple et Powered Echelon Plus avec système GST en mai 2018

Rapprocher les tissus en réduisant les déchirures de la couche externe.*

Taux de rapprochement tissulaire réussi

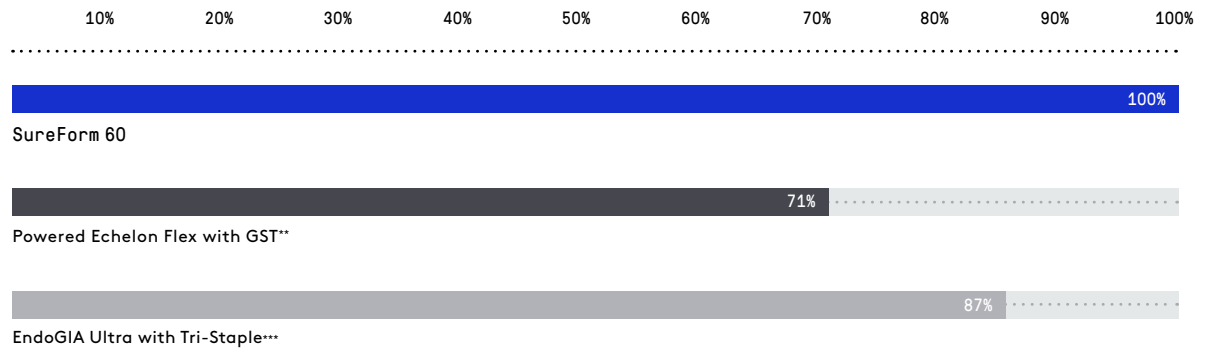


** Statistiquement significatif

*** Statistiquement non significatif

Tissus fins ou épais, des lignes d'agrafes à la perfection.*

Pourcentage de réussite dans la réalisation optimale de lignes d'agrafes

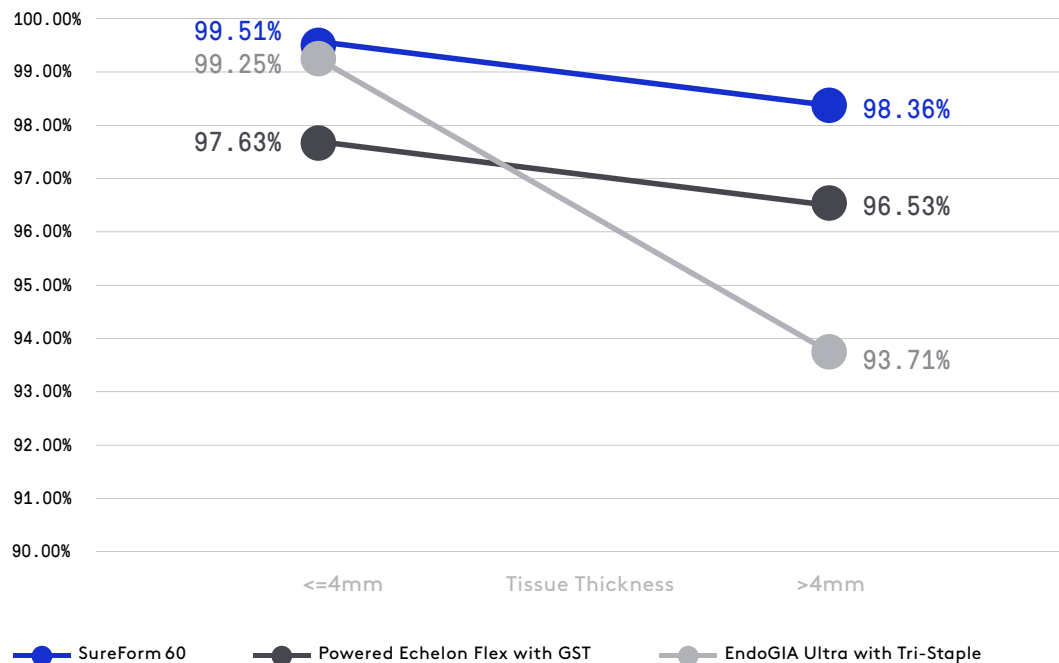

La différence entre les dispositifs SureForm 60 et EndoGIA Ultra avec Tri-Staple sur les tissus fins n'est pas statistiquement significative.

* Comparé aux dispositifs EndoGIA Ultra avec technologie Tri-Staple et Powered Echelon Plus avec GST en mai 2018

Une meilleure régularité.


Les mesures et ajustements automatiques de SmartFire pendant le déclenchement favorisent le contrôle du tissu.

Ainsi, la ligne de coupe est régulière et la longueur de transection souhaitée obtenue.

La qualité du résultat réduit les recours inopinés aux recharges, et par conséquent le coût de la procédure.

Créer une longueur de coupe plus régulière sur les tissus fins et épais.*

Longueur de coupe moyenne (mm)

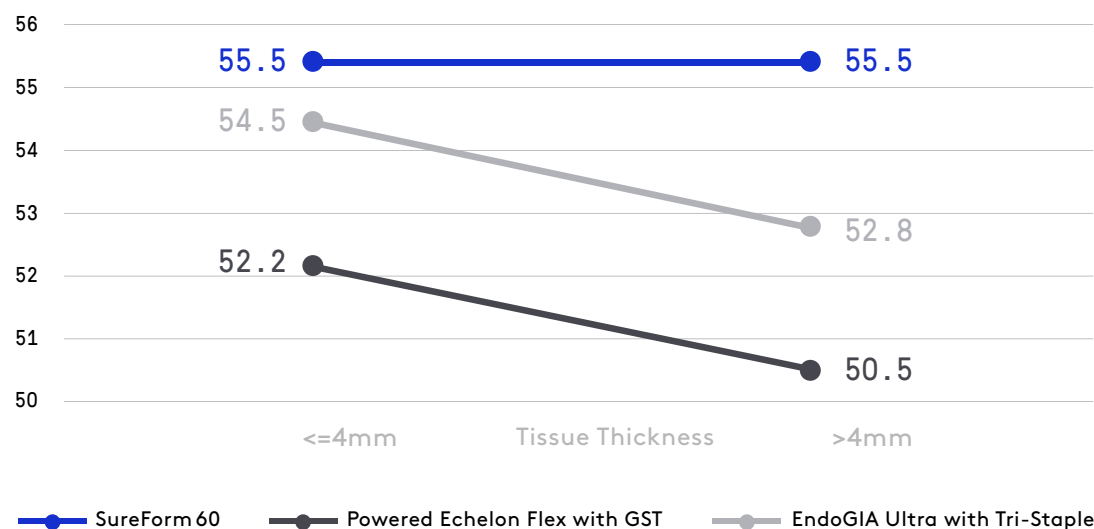


* Comparé aux dispositifs EndoGIA Ultra avec technologie Tri-Staple et Powered Echelon Plus avec GST en mai 2018

Un serrage et un déclenchement plus stables.*




4,5 mm

SureForm 60

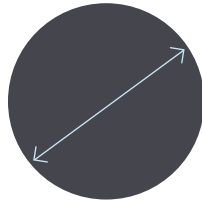

11,9 mm

**Agrafeuse Echelon Flex
avec système GST**

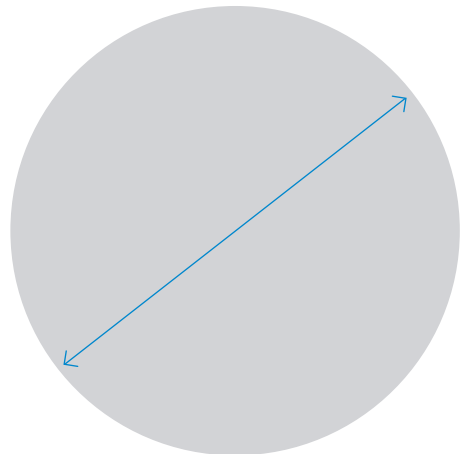

28 mm

**Agrafeuse EndoGIA Ultra
avec système Tri-Staple**

Comparatif du nombre moyen de mouvements des extrémités pendant le serrage et le déclenchement.

Les images sont à titre indicatif uniquement et ne reflètent pas la taille exacte.

* Comparé aux dispositifs EndoGIA Ultra avec technologie Tri-Staple et Powered Echelon Plus avec GST en mai 2018

Caractéristiques supplémentaires du SureForm™ 60

Caractéristiques de l'instrument

Ligne d'agrafes 60 mm / Ligne de coupe 55 mm

Modèle à enclume

Fonctionne avec une canule de 12 mm

12 déclenchements par dispositif

À usage unique

Caractéristiques des recharges

Recharges blanches, bleues, vertes, noires

6 rangées d'agrafes

Nouvelle lame à chaque recharge

Informations concernant l'achat

Pour contacter un représentant ou recevoir des informations supplémentaires, rendez-vous sur www.intuitive.com ou appelez le service clientèle d'Intuitive Surgical en composant le +41.21.821.2020 ou le +800.0821.2020 pour l'Europe.



SureForm™ 60 pour agrafage Da Vinci®

6 dispositifs par boîte	480460
-------------------------	--------

da Vinci X et da Vinci Xi



Recharge blanche pour SureForm™ 60

12 unités par boîte	48360W
---------------------	--------



Recharges bleues pour SureForm™ 60

12 unités par boîte	48360B
---------------------	--------



Recharges vertes pour SureForm™ 60

12 unités par boîte	48360G
---------------------	--------



Recharges noires pour SureForm™ 60

12 unités par boîte	48360T
---------------------	--------

Divulgation

Les études comparatives mises en évidence dans ce document ont été réalisées en environnement de travail réel ou virtuel et n'étaient pas statistiquement étayées pour montrer les différences observées. Le seuil de signification pour relever les différences statistiquement importantes a été fixé à $p < 0,05$.

Informations importantes de sécurité

De graves complications peuvent avoir lieu lors des interventions chirurgicales, y compris avec les technologies da Vinci®, et entraîner la mort. Entre autres exemples de complications graves et potentiellement mortelles pouvant justifier une hospitalisation prolongée et/ou imprévue, et/ou une nouvelle intervention chirurgicale, on peut citer les lésions organiques ou tissulaires, hémorragies, infections ou cicatrices internes pouvant causer des dysfonctionnements ou douleurs durables.

Les risques spécifiques à la chirurgie mini-invasive, y compris la chirurgie da Vinci®, comprennent, mais ne sont pas limités à, un ou plusieurs des éléments suivants : douleurs ou troubles nerveux temporaires résultant du positionnement ; allongement de la durée, le besoin d'adopter une approche ouverte ou la nécessité de procéder à des incisions supplémentaires ou plus larges. La conversion de la procédure peut impliquer une durée d'intervention plus longue, un placement sous anesthésie prolongé et un risque de complications accru. Les contre-indications concernant l'utilisation des instruments endoscopiques conventionnels s'appliquent également à tous les instruments da Vinci.

Pour les informations de sécurité importantes, instructions d'utilisation, risques, précautions et mises en garde, veuillez également consulter les sites www.davincisurgery.com/safety et www.intuitivesurgical.com/safety.

Les résultats chirurgicaux individuels peuvent varier.

Le Stapler 60, les recharges et accessoires d'Intuitive Surgical sont conçus pour être utilisés avec un système chirurgical da Vinci compatible pour la résection, la transection et/ou les anastomoses en chirurgie générale, thoracique, gynécologique et urologique. Le dispositif peut être utilisé chez l'adulte et l'enfant. Le dispositif peut être utilisé avec une ligne d'agrafes ou un renfort de tissu (naturel ou synthétique).

Le Stapler 60, les recharges et accessoires sont des dispositifs médicaux de classe IIa et IIb (CE0543) qui portent le marquage CE conformément à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et ont été fabriqués par Intuitive Surgical, Inc. Veuillez consulter le mode d'emploi avant utilisation.

Sauf indication contraire, tous les individus représentés picturalement sont des mannequins.

© 2018 Intuitive Surgical, Inc. Tous droits réservés. Les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.



Europe

Intuitive Surgical Sàrl
1 Chemin des Mûriers
1170 Aubonne, CH

N° de TVA : CHE-113.407.162 VAT

Allemagne

Intuitive Surgical GmbH
Pelmanstrasse 46
45131 Essen, DE

N° de TVA : DE200038727
Amtsgericht Essen, HRB 13476

France

Intuitive Surgical SAS
41-43 Rue Perier
92120 Montrouge, FR

N° de TVA : FR 64 417 889 177
SIRET 417 889 177

Capital Social 37 000 €
RCS Nanterre Code APE 4646Z

Royaume-Uni

Intuitive Surgical Ltd
16-18 Station Road, Chapeltown
S35 2XH Sheffield, UK

N° de TVA : GB943 2213 49
Société immatriculée sous le
numéro 6727762